

Oxivir Excel Foam Acti

Gotowy do użycia preparat myjąco-dezynfekujący do nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz powierzchni nieporowatych

Opis

Oxivir Excel Foam Acti to gotowy do użycia preparat w postaci pianki do mycia i dezynfekcji w jednym kroku. Produkt oparty jest na technologii AHP i przeznaczony do stosowania we wszystkich obszarach zastosowania – do mycia i dezynfekcji twardych powierzchni oraz powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych (wyłącznie do użytku profesjonalnego).

Cechy

- Gotowy do użycia preparat w formie pianki (aplikowanej dzięki sprykiwaczowi), dedykowany do wszystkich obszarów zastosowań, w tym obszarów opieki zdrowotnej, obszarów niezwiązanych z opieką zdrowotną i sektorów spożywczych;
- Pełne działanie wirusobójcze;
- Szybkie działanie wobec szerokiego spektrum wirusów, bakterii i drożdży;
- Doskonałe właściwości myjące dzięki wysokowydajnemu systemowi substancji powierzchniowo czynnych;
- Preparat bezzapachowy;
- Nie wymaga spłukiwania;
- Substancja aktywna rozkłada się na wodę i tlen;
- Preparat biobójczy zatwierdzony przez BPR;
- Certyfikowany wyrób medyczny;

CE
0044



**Diversey Europe
Operations B.V.**
De Corridor 4,
3621 ZB Breukelen,
The Netherlands.
www.solenis.com



BPR
APPROVED



© A.I.S.E

Oxivir Excel Foam Acti

Zalety

- Oxivir Excel Foam Acti zapewnia skuteczność o szerokim spektrum działania wobec bakterii, drożdży i wirusów przy krótkich czasach kontaktu, gwarantując najwyższy poziom dezynfekcji wobec wielu istotnych patogenów.
- Produkt zatwierdzony zgodnie z BPR i szeroko testowany zgodnie z normami europejskimi.
- Oxivir Excel Foam Acti posiada pełne właściwości wirusobójcze, w tym udowodnioną skuteczność przeciwko wirusom bezotoczkowym, takim jak Polio, Adeno, Murine Norovirus i wirusom otoczkowym, takim jak koronawirus, wirus Vaccinia, HIV, HBV, HCV i grypa.
- Dzięki silnym substancjom powierzchniowo czynnym produkt cechuje się bardzo dobrą skutecznością mycia.
- Formuła AHP jest łagodna dla powierzchni, wydłuża żywotność sprzętu i nie pozostawia agresywnych pozostałości.
- Oxivir Excel Foam Acti nadaje się do codziennego czyszczenia i dezynfekcji twardych powierzchni, a także do stosowania w obszarach o wysokim stopniu kontaktu (strefy dotykowe) w handlu detalicznym, edukacji, gastronomii, opiece długoterminowej i innych sektorach, a także w obszarach wysokiego ryzyka w szpitalach, takich jak sale operacyjne, OIOM, NICU i sale pacjentów.
- Nie wymaga stosowania środków ochrony indywidualnej, z wyjątkiem długotrwałego użytkowania.

Sposób użycia

Spryskiwanie powierzchni pianą (małe powierzchnie) i rozprowadzanie nasączoną ściereczką (stosować w temperaturze pokojowej):

- Usuń luźne zabrudzenia.
- Nałóż produkt, całkowicie zwilżając nieporowatą powierzchnię i/lub nieinwazyjny wyrób medyczny.
- Pozostaw do zadziałania na 5 minut.
- Pozostaw do wyschnięcia. Powierzchnia nie wymaga splukiwania wodą.
- Umyj ręce po użyciu.

Dane techniczne

Postać:	Przezroczysta ciecz o barwie od żółtej do bezbarwnej
Zapach:	Neutralny
pH (koncentrat):	≈ 1.95
Gęstość względna (20°C):	≈ 1.
Okres trwałości:	2 lata od daty produkcji (data ważności: patrz opakowanie)
Substancja czynna:	0,36% nadtlenek wodoru

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Środki ostrożności i magazynowanie

Pełne wytyczne odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki. sds.solenis.com. Postępować zgodnie z zasadami dobrej praktyki higieny przemysłowej i bezpieczeństwa. Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt. Nie mieszać z innymi produktami, chyba że zaleci to Diversey. Przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, z dala od skrajnych temperatur. Produkt nie jest przeznaczony do ponownego użycia. Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Oxivir Excel Foam Acti

Uwaga

Przechowywać w temperaturze od 6 °C do 35 °C. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Chronić przed światłem słonecznym. Ostrzeżenie: może powodować korozję metali.

Indywidualny sprzęt ochronny

Wyczerpujące wytyczne dotyczące środków ochrony indywidualnej dla tego produktu znajdują się w oddzielnej karcie charakterystyki; sds.diversey.com.

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ: Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. **Ochrona rąk:** Po użyciu opłukać i osuszyć ręce. W przypadku długotrwałego kontaktu może być konieczna ochrona skóry.

Postępowanie z odpadami

Pełne wytyczne dotyczące utylizacji tego produktu znajdują się w oddzielnej karcie charakterystyki; sds.diversey.com.

Kompatybilność produktu

Oxivir Excel Foam Acti jest przeznaczony do dezynfekcji twardych powierzchni, w tym twardych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. W zalecanych warunkach stosowania Oxivir Excel Foam Acti nadaje się do stosowania na powierzchniach takich jak stal nierdzewna, chrom, winyl, tkaniny nylonowe, powierzchnie laminowane, szkło, guma, twarde i elastyczne tworzywa sztuczne (polipropylen, poliuretan, polietylen, akryl PVC, włókno szklane i poliwęglan). Zastosowania inne niż wymienione nie są zalecane. Oxivir Excel Foam Acti nie jest przeznaczony do stosowania na inwazyjnych urządzeniach medycznych. **Nie mieszać z innymi produktami. Nie stosować na powierzchniach porowatych ani wrażliwych na kwasy.**

Dane mikrobiologiczne

Obszar zastosowania: PT2 obszar Opieki Zdrowotnej warunki brudne, PT2 obszar poza Opieką Zdrowotną warunki brudne & PT4 powierzchnie mające kontakt z żywnością warunki brudne

Metoda aplikacji	Działanie	Norma EN	Organizmy	Stężenie	Czas kontaktu
Piana - Natryśnięcie i opcjonalne przecieranie	Bakteriobójcze	EN 13727 EN 1276 EN 13697 EN 16615	E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus, E. coli.	Gotowy do użycia	5 min
	Drożdżobójcze	EN 13624 EN 1650 EN 13697 EN 16615	C. albicans		
	Wirusobójcze	EN 14476	Adenowirus, Murine Norowirus, Poliowirus		

Informacja środowiskowa

Środki powierzchniowo czynne użyte w tym produkcie ulegają biodegradacji zgodnie z wymogami rozporządzenia UE w sprawie detergentów, WE 648/2004.

Certyfikaty

- Produkt biobójczy: BPR EU-0032483-0002 1-2
- Jednostka notyfikowana ds. wyrobów medycznych: CE0044

Oxivir Excel Foam Acti

www.solenis.com

© 2026 Solenis LLC. All Rights Reserved. Rev.12/03/2026 pl-PL (K02980)